
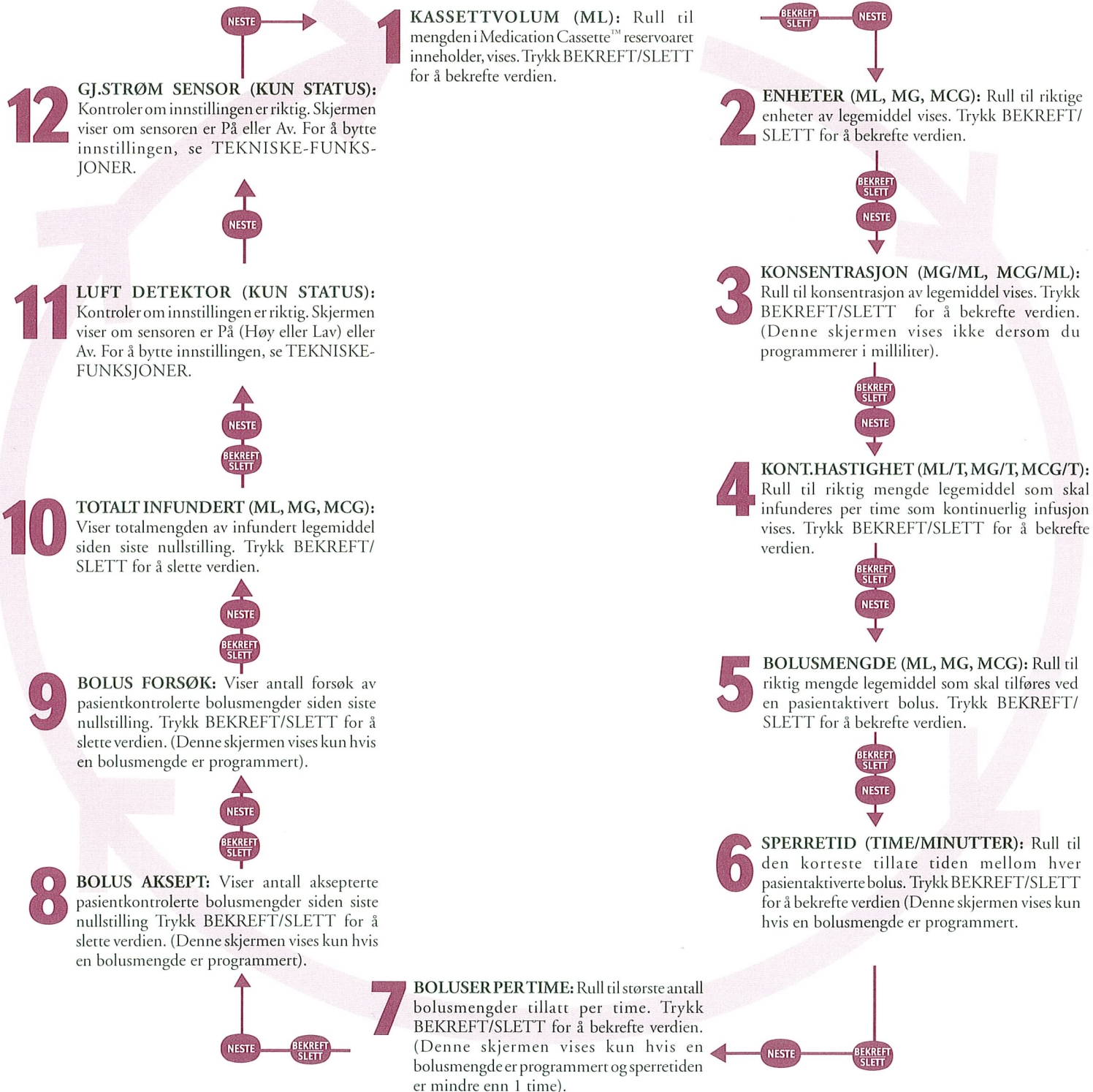


Opplæringsguide

CADD-Legacy[®] PCA Pumpe Modell 6300

Installerer nye batterier i batterirommet.
Skyv batterilokket til det lukkes.

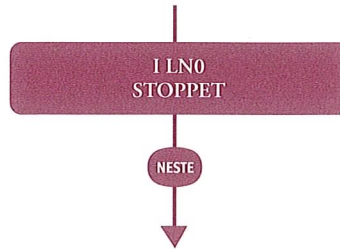

Opplæringsguide

CADD-Legacy® PCA Pumpe Modell 6300

INFUSJONSPROFIL FOR CADD-Legacy® PCA Pumpe Modell 6300



ANDRE PUMPEFUNKSJONER

Starte pumpen: Trykk og hold START/STOPP til Starter og (-----) forsvinner én etter én fra skjermen. Slipp START/STOPP-tasten. INF vises på skjermen.

Stopp pumpen: Trykk og hold START/STOPP til Stopper og (-----) dukker opp én etter én på skjermen. Slipp START/STOPP-tasten. STOPPET vises på skjermen.

Settets påfylling: Når pumpen er stoppet og i LN0 eller LN1, trykk og hold FYLLE SETT til ordene FYLLE SETT vises på skjermen, fulgt av (-----) som dukker opp én etter én. Slipp FYLLE SETT. Trykk og hold FYLLE SETT inntil væskebanen er luftfri. Trykk NESTE for å gå ut av Fylle Sett-skjermen.

ADVARSEL: Ikke fyll væskebanen med slangen festet til en pasient da dette kan føre til overinfusjon av legemiddel eller luftemboli.

For å skru på pumpen: Trykk PÅ/AV: Pumpen bipper mens den går igjennom sine aktiveringsrutiner.

For å skru av pumpen: Trykk og hold PÅ/AV til (••••••••••) dukker opp, én etter én og Skrur Av vises på skjermen. Skjermen blir blank siden pumpen går over til hvilestilling..

Hvordan infundere en Kliniker bolus (mcg, mg, ml): Pumpen må være i gang. Trykk LÅS slik at koden vises. Trykk Δ eller ∇ til Kliniker bolus-koden vises. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT og da vil 00,0 vises. Trykk Δ inntil ønsket bolusmengde vises (mcg, mg, ml). Trykk enten BOLUS eller BEKREFT/SLETT for å starte kliniker bolus. Dersom du ønsker å stoppe en kliniker bolus, trykk og hold START/STOPP for å stoppe pumpen. **Merk:** Hvis pumpen er programmert i MG, vises MG på skjermen; hvis pumpen er programmert i ML, vises ML på skjermen, og hvis pumpen er programmert i MCG, vises MCG på skjermen.

HVORDAN ENDRE LÅSENVÅER

Pumpen må være stoppet.

1. Trykk LÅS for å se det aktuelle låsenivået.
2. Trykk Δ eller ∇ til ønsket Låse nivå vises (LN0, LN1, LN2).
3. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT. Kode og 0 vises.
4. Trykk Δ eller ∇ til Låse nivå-koden vises.
5. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT for å bekrefte det nye låsenivået.

Trykk LÅS igjen for å verifisere det nye låsenivået.

LÅSE NIVÅ 0 (LN0) er programmeringsnivået.

LÅSE NIVÅ 1 (LN1) lar pasienten starte og stoppe pumpen, fyller slangesettet, tilbakestille kassettvolumet og slette alle TOTALT INFUNDERT-skjermene. Den kontinuerlige hastigheten og bolusmengden kan minskes og økes opp til verdiene som er programmert i LN0.

LÅSE NIVÅ 2 (LN2) lar pasienten stoppe og starte pumpen og tilbakestille kassettvolumet.

TEKNISKE-FUNKSJONER

Pumpen må være stoppet og i LN0. For å få tilgang til Tekniske funksjoner:

1. Trykk LÅS
2. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT. Kode og 0 vises.
3. Trykk Δ eller ∇ til biomedkoden vises.
4. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT.
5. Trykk NESTE for å gå igjennom innstillingene.

For å skru Luft detektoren PÅ-HØY, PÅ-LAV eller AV:

6. Trykk NESTE til LUFT DETEKTOR vises.
7. Trykk Δ eller ∇ til ønsket innstilling vises.
8. Trykk BEKREFT/SLETT.

ADVARSEL: Når Gj.strømnings sensoren er slått av, detekterer ikke pumpen om det er luft i væskebanen. Undersøk væskebanen regelmessig og fjern evt. luft for å forebygge luftemboli.

For å skru Gj.Strøm sensor PÅ/AV:

9. Trykk NESTE til GJ.STRØM SENSOR vises.
10. Trykk Δ eller ∇ til ønsket innstilling vises.
11. Trykk BEKREFT/SLETT.

ADVARSEL: Når sensoren for okklusjon på væskesiden er slått av, detekterer ikke pumpen okklusjoner på væskesiden (mellom pumpen og kassetten). Undersøk kassetten ved mellomrom for redusert kassettvolum og undersøk væskebanen for floker, en lukket klemme eller andre obstruksjoner på væskesiden. Okklusjoner på væskesiden kan føre til under- Okklusjoner på væskesiden kan føre til under-infusjon av legemidler.

For å gå ut av Teknisk:

12. Trykk NESTE til NESTE = TEKNISK, BEKREFT = PROGR vises.
13. Trykk BEKREFT/SLETT for å gå tilbake til hovedskjermen.

Deltec

SIMS Deltec, Inc., St. Paul, MN 55112 U.S.A.

sims SMITHS INDUSTRIES
Medical Systems



ADVARSEL: Dette Rask Referansekortet bør kun brukes av klinikere. Ikke la pasienter få adgang til kortet, da informasjonen ville la dem få tilgang til programmering og driftsfunksjoner. Les igjennom hele Operatormanualen for du bruker CADD-Legacy® bærbar infusjonspumpe. Dersom man unnlater å følge advarsler, forsiktighetsregler og anvisninger kan dette medføre død eller alvorlig skade på pasienten. Dersom pumpen faller ned eller får stot, undersøk om den er blitt skadet. Ikke bruk en pumpe som er skadet eller som ikke fungerer riktig.