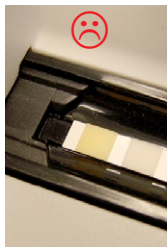
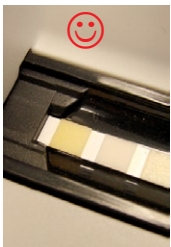
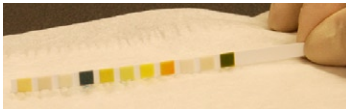
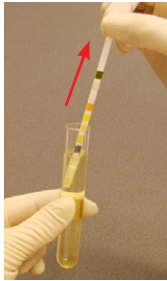
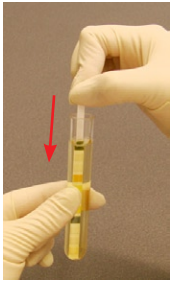
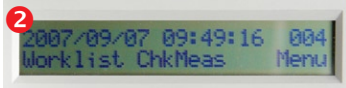
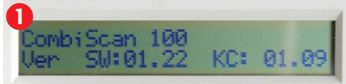


N

Hurtigveiledning CombiScan® 100

**1.**


Sett strømadapteren i uttaket på baksiden av instrumentet, og sett kontakten i et strøm-uttak i veggen. På skjermen vises først Startmenyen **1**. Når Hovedmenyen vises **2**, er CombiScan 100 klar til bruk.

2.


Dypp teststrimmelen i urinprøven (2 sekunder). Det er viktig at alle reagensfeltene på strimmelen dyppes i urinen. Stryk forsiktig kanten av strimmelen mot et papir for å fjerne overflødig urin.

3.


Plasser teststrimmelen i strimmelholderen. Se til at strimmelen er satt helt inn – riktig vei. (Se bilde)!

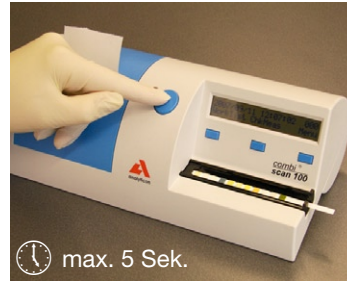**4.**

Trykk på startknappen innen 5 sekunder etter at strimmelen er dyppet i prøven. I normal modus vil CombiScan 100 lese av strimmelen etter 60 sekunder.

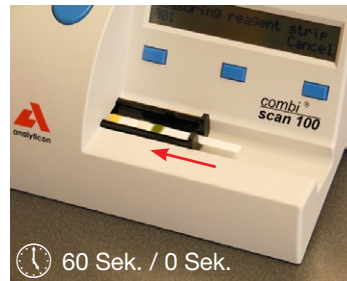**5.**

Resultatene vil bli skrevet ut når analysene er ferdige. Fjern og kast den brukte strimmelen og rengjør strimmelholderen. (se baksiden: vedlikehold av instrumentet).

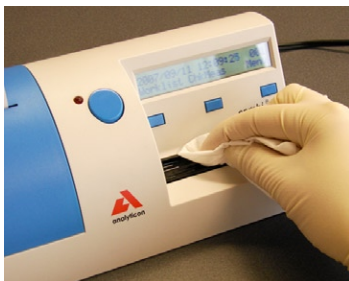

Vedlikehold av instrumentet:

Rengjør strimmelholderen med et lofritt papir etter hver måling.

Oppretthold en god hygiene ved å holde de ytre delene og overflaten av instrumentet rent. Til rengjøring anbefales et kommersielt rengjørings- eller desinfeksjonsmiddel og en myk klut. Vask strimmelholderen daglig etter endt bruk. Holderen kan tas løs fra instrumentet for å vaske og desinfisere den separat. Vær forsiktig slik at ikke det grå karbiberingsfeltets overflate blir ødelagt eller fuktig. Vær nøye med at strimmelholderen er tørr når den settes på plass igjen.



Mer detaljert informasjon finnes i Brukermanualen.

Kvalitetskontroll

CombiScreen Kontrol PN er flytende eksterne kvalitetskontroller til bruk sammen med CombiScreen strimlene. Disse er tilgjengelige fra Analyticon.

Kontrollene bør analyseres ved følgende forhold:

- For hver ny operatør (bruker)- før pasientprøver analyseres
- Når en ny lot strimler tas i bruk
- Hvis strimlene ikke er oppbevart i henhold til den anbefalte oppbevaringstemperaturen
- I henhold til lokale retningslinjer

Fullstendig instruksjoner finnes i pakningsvedlegget for kontrollen.

Fabrikkinnstillinger:

Funksjon	Fabrikkinnstilling	Endre innstillinger via
Dato	ÅÅÅÅ/MM/DD	Meny/Setup/Klokke/Innstilling
Tid	TT/MM/SS	Meny/Setup/Klokke/Innstilling
Skriver	PÅ	Meny/Setup/ Utdata/Skriver
Målemodus	Normal	Meny/Måle/Målemodus
Sensitivitet	Default	Meny/Setup/Strimmel/Strimmel/Sensitivitet
Analytrekkefølge	Default	Meny/Setup/Strimmel/Strimmel/Sekvens
Enhet	Konv.	Meny/Setup/Strimmel/Enhet
Protokoll	PC	Meny/Setup/Utdata/Seriell/Protokoll
Baudrate	9600	Meny/Setup/Utdata/Seriell/Baudrate
Språk	Engelsk	Meny/setup/Utdata/Språk
Minne	Tom	
Strimmeltype	11	Meny/Måle/Strimmeltype
Kommentarlinje	AV	Meny/Måle/Kommentar
Lock out	AV	Meny/Setup/Strimmel/Lockout
OperatørID	AV	Meny/Setup/Strimmel/Strimmel/OplD

Liste over reservedeler/forbruksartikler:

94100	CombiScreen® 11SYS PLUS (100 EA/BX)
94110	CombiScreen® 7 PLUS (100 EA/BX)
94109	CombiScreen® 5 PLUS (100 EA/BX)
93001	CombiScreen® Control PN
A93010	Papir til termalskriver (57 mm x 25 m)
UCP-4404-1	Strimmelholder
UCP-4414-1	Gråstrimmel
UCP-4604-1	Seriell kabel
358USBAB	USB kabel
1ASA7V1A	Strømadapter



Analyticon
Biotechnologies AG
35104 Lichtenfels
Germany
info@analyticon-diagnostics.com
www.analyticon-diagnostics.com