

Anbefalt rengjøringsprosedyre for Promotal

Vennligst les instruksjonene nøye før det settes i gang med rengjøringen.

Epoksy - understell på benk og stol

Alt av ordinære rengjøringsproduktet kan benyttes.

Følgene må **ikke** benyttes til rengjøringen av epoksy:

Løsninger:	- Bensin	Baser:	- 10 % natrium
	Høyholdig alkohol som:		- 10 % ammonium
	- parafiner		
	- aromatiske forbindelser		
	- Keton ester		
	- Tri/perkloretylen		
Syrer:	- 30 % salpetersyre	Andre:	- Destillert vann
	- 30 % klor		- Blekemiddel
	- 10 % sitronsyre		- Alt av produkter med slipemiddel



Skai - trekk på benk, stol og krakk

Benytt en fuktet klut og såpevann eks. mild grønnsåpe.

For flekket som fortsatt sitter benyttes en klut gjennombløtt med Whitesprit eller i en løsning laget av vann og alkohol (mindre enn 30 % styrke). Det skal ikke skrubbes, men trykkes forsiktig gjentatte ganger på det flekkete området. ARX spray kan benyttes.

Følgene må **ikke** benyttes til rengjøringen av skai:

- Ren alkohol	- Alt av produkter med slipemidler
- Aceton	- Renseoppløsning
- Tri/perkloretylen	- Voks

