

CoaguChek XS Plus – brukerveiledning



Sett inn kodebrikke




Velg pasienttest



Skriv evt. inn pas.-ID



Sett inn strimmel

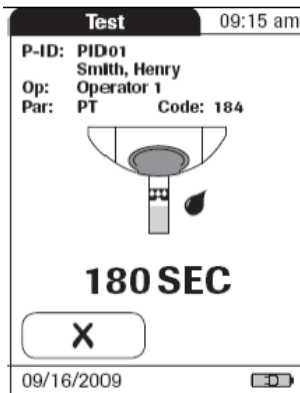

Vent til dette skjermbildet vises



Ta en kapillær blodprøve






Appliser første blod-dråpe innen 15 sek.








Avles resultatet

CoaguChek XS Plus - kvalitetskontroll

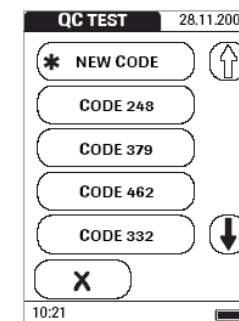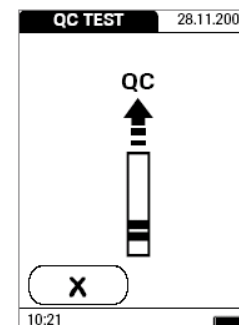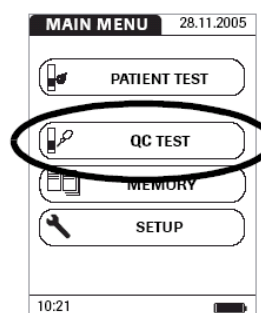

Klipp av tuppen på pipetten og overfør hele innholdet til kontrollglasset. Press kontrollvæsken ut og inn av pipetten et par ganger, sett på korken og bland ved å virvle væsken rundt i glasset til alt tørrstoffet er oppløst. Holdbar i 30 minutter.

Velg QC test fra menyen og sett inn en teststrimmel. Velg riktig kode eller trykk "Ny kode" dersom nytt lotnummer skal tas i bruk.

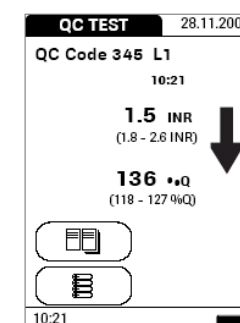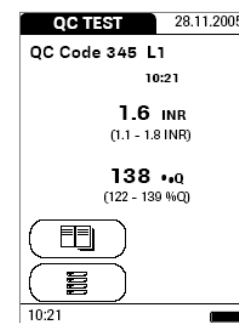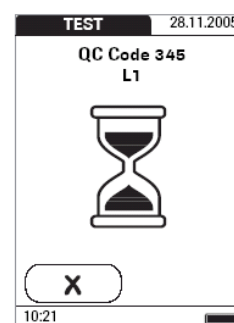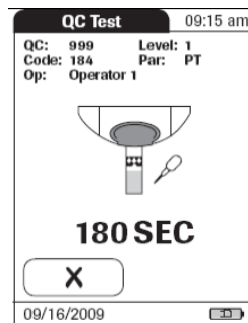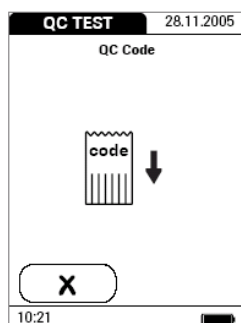

I tilfelle ny kode skal brukes må den nye kodebrikken i kontrollpakningen settes inn. Når skjermen viser et pipettesymbol kan kontrollvæsken overføres til teststrimmelen. Bruk den samme pipetten som tidligere.

Timeglasset vises mens kontrollen analyseres. Resultatet kommer frem på skjermen sammen med fasitintervallet. Dersom resultatet er før høyt eller for lavt i forhold til fasit vil en blinkende pil opp/ned vises.